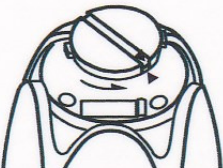
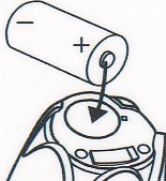
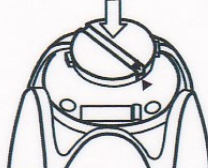
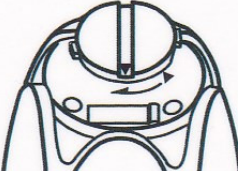
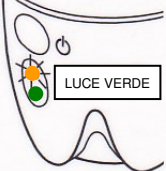


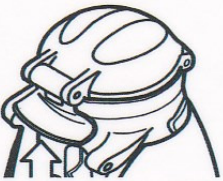
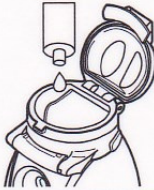
GUIDA D'USO RAPIDA

**Si consiglia di NON rimuovere mai la mesh dalla sua sede.
NON utilizzare liquidi oleosi se non diluiti con soluzione fisiologica.**

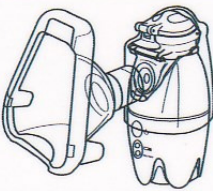
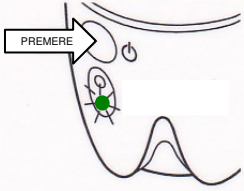
COME INSERIRE LA BATTERIA

1. Aprire il coperchio della batteria con l'apposita chiave.	2. Introdurre la batteria facendo attenzione ad inserire le polarità (+/-) corrette.	3. Richiudere il coperchio della batteria allineando le due frecce.
		
4. Spingere con decisione e richiudere il coperchio con l'apposita chiave.	5. Ricaricare le batterie quando l'indicatore GIALLO inizia a lampeggiare.	6. La ricarica sarà completa quando l'indicatore diventerà nuovamente VERDE.
		

COME VERSARE IL MEDICINALE

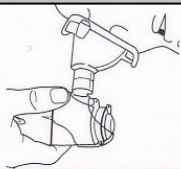
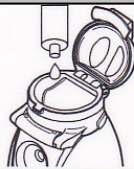
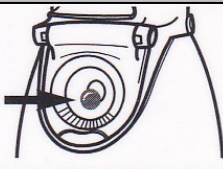
1. Aprire il coperchio della bottiglietta trasparente.	2. Versare il medicinale o altra soluzione fino ad un massimo di 6 ml.	3. Richiudere il coperchio della bottiglietta e spingere fino a sentire un "click".
		

COME UTILIZZARE NEPLUS

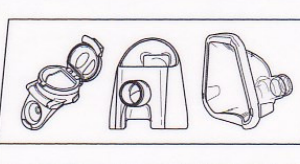
1. Inserire il cappuccio adattatore e la maschera prescelta (S/L o boccaglio).	2. Premere il tasto per iniziare la terapia. L'indicatore luminoso diventerà VERDE.	3. Avvicinare al viso ed inalare.
		

GUIDA D'USO RAPIDA

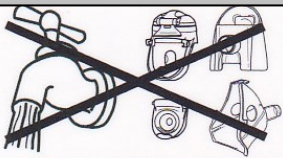
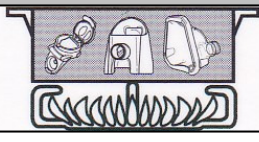
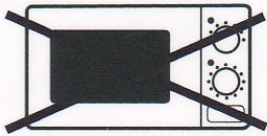
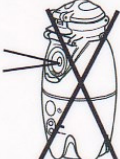
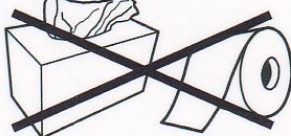
PRECAUZIONI DURANTE L'UTILIZZO

NON inclinare NEPLUS oltre 75°. Potrebbe non funzionare o il liquido fuoriuscire.	NON accenderlo mai senza liquido nella bottiglietta. NON usare soluzioni oleose.	Se il liquido fuoriesce dalla mesh, asciugare con una garza e accendere subito NEPLUS.
		

COME PULIRE NEPLUS DOPO L'USO

1. Svuotare la bottiglietta da eventuali residui di liquido non nebulizzato.	2. Risciacquare delicatamente tutte le parti lavabili in un contenitore d'acqua.	3. Far asciugare tutte le parti perfettamente prima del prossimo utilizzo.
	 NON RIMUOVERE MAI LA MESH PER LA PULIZIA.	

PRECAUZIONI DOPO L'USO

NON lavare mai le parti sotto il getto dell'acqua corrente.	NON lavare o bagnare l'unità principale.	Sterilizzare facendo bollire tutte le parti per un minuto . Non superare mai il tempo indicato.
		 NON RIMUOVERE MAI LA MESH PER LA PULIZIA.
NON far bollire e NON asciugare gli accessori nel forno a microonde.	NON rimuovere la mesh. NON toccarla con spilli o altri oggetti appuntiti.	Per asciugare le parti utilizzare garza. NON utilizzare fazzoletti di carta o cotone.
		

IMPORTATORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA

INFINISURGE SRL
Via Villalta, 57-61
33100 Udine (UD)
info@infinisurge.eu
www.infinisurge.eu



INFINISURGE