



InfiniSurge Srl a S.U.
Surgical & biomedical engineering

Via Villalta, 57-61
33100 UDINE
C.F. e P.IVA 02653950309

SCHEMA TECNICA Mascherina monoutilizzo FFP2

Nome commerciale: FFP2 MASK.

Dispositivo Medico: no.

Codici:

SNN70369B

Prodotto da:

Shandong Shengquan New Materilas Co. Ltd.
Diaozhen Industrial Development Zone
Zhangqiu, Jinan, China.

Distribuito da:

INFINISURGE S.R.L.
Via Villalta, 57-61
33100 UDINE
ITALIA

Standard

EN 149:2001 + A1:2009.
CE 2834

INAIL: validata.

D.P.I. di Classe III.

Dispositivo medico sterile: NO

Descrizione completa:

Le mascherine monoutilizzo FFP2 offrono una protezione efficace contro polveri fini tossiche, fumi, nebbie.

Materiale filtrante: strato esterno in TNT,

strato filtrante in polimero fuso,

strato antibatterico in grafene, tampone in PET,

strato dermatofilo in TNT 30 gr.
Elastico: gomma naturale.

Massima resistenza respiratoria:

con flusso d'aria compreso tra 30L/min e 95 L/min,
la resistenza varia da 0,7 mbar a 2,4 mbar.

ISTRUZIONI per L'USO:

indossare correttamente il dispositivo di protezione,
posizionando nel modo giusto gli elastici dietro la
testa e la nuca;
la concentrazione d'ossigeno nell'atmosfera circostante deve
essere almeno pari al 19,5% in volume;
le mascherine devono essere cambiate se danneggiate
e se la resistenza alla respirazione diventa elevata in
seguito al loro intasamento o al termine del turno/servizio.

Conservazione: validità ed efficacia del prodotto entro i 36 mesi
conservare in luogo fresco e asciutto a una temperatura non inferiore ai
10° C. e non superiore ai 32° C.